

Новое поколение оправ для детских очков,
полностью изготовленных из пластмассы

TRU  **FRAME**

ИННОВАЦИОННО И НАДЕЖНО!

Новая линия оправ TRUFRAME® была разработана для маленьких детей, резвых детей, а также для занятий спортом. По сравнению с обычными оправами для очков оправы, полностью изготовленные из пластмассы, в значительной мере снижают риск получения травм. Простота в обращении, надежность и незначительный вес – это главные отличительные черты этого нового поколения очков.



Обзор преимуществ:

- сочной и яркой расцветки, разработаны специально для детей,
- сниженный риск получения травмы,
- эластичная лента гарантирует правильную посадку оправы,
- не содержит металлов и никеля,
- можно использовать в качестве очков для занятий спортом или запасных очков,
- можно использовать также и для инвалидов,
- отпадает необходимость в частой юстировке у специалиста-оптика,
- экономичность,
- изготовлено в Германии.

Разработанные специально для детей оправы для очков изготавливаются в разнообразных расцветках и формах и чаще всего оцениваются детьми положительно. Поэтому привлекайте Вашего ребенка к выбору очков.

Часто родители и учителя опасаются позволить детям пользоваться очками во время занятий спортом. Однако это ведь часто является единственной для ребенка возможностью видеть окружающий мир трехмерным и резким. Рекомендация по ношению очков и окклюдора всегда зависит от конкретного случая. Если у Вас возникнут сомнения, не стесняйтесь и обратитесь с вопросами к Вашему ортопсту и к Вашему врачу-окулисту.

Мы надеемся, что наша информация помогла Вам, и желаем Вам и Вашему ребенку успехов при лечении косоглазия и амблиопии.

Мы с удовольствием готовы ответить на Ваши дополнительные вопросы.

Ваша группа поддержки от фирмы

TRUSETAL VERBANDSTOFFWERK GMBH

Industriestr. 12
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Телефон: 05207 991688-0
Факс: 05207 991688-28

e-мэйл: info@tshs.eu
Интернет: www.tshs.eu • www.ortopad-service.eu

Мы рады, что также и в этом году у нас есть возможность оказать поддержку проектам в Африке и в Восточной Европе при помощи ORTOPAD® и денежных пожертвований.

TRUSETAL VERBANDSTOFFWERK GMBH

Trusetal

Информация для родителей

ORTOPAD® mix

100 отлично переносимых окклюдоров



25 веселых расцветок на выбор

- прорези в пластыре
- анатомическая форма
- гипоаллергенный клей
- светонепроницаемые
- приятные для кожи
- воздухопроницаемые



не содержат латекс

разноцветные наклейки на глаз для ортоптического лечения

Уважаемые родители,

для лечения косоглазия и / или функционального снижения зрения у Вашего ребенка Вам порекомендовали провести лечение при помощи окклюдоров.

Скорее всего, поначалу Вы обеспокоены. В рамках проведения обследований на Вас обрушилась масса информации, которую Вам нужно «переварить» в спокойной обстановке. Ниже мы приводим для Вас кое-какие рекомендации относительно окклюдоров (наклеек) и оправ для очков:




Часто лечение при помощи окклюдоров сопряжено с ношением очков. Взбодрите Вашего ребенка мыслью о том, что благодаря настойчивому ношению очков и окклюдоров можно улучшить зрение и часто даже совсем нормализовать.



Все ORTOPAD®-окклюдоры были разработаны при участии детей, они выпускаются в трех различных размерах (ORTOPAD® Junior, Medium и Regular), с различными расцветками (ORTOPAD® simpaty NEW, ORTOPAD® for girls, ORTOPAD® for boys, ORTOPAD® COTTON), а также белого цвета и в варианте skin.

Поскольку на данные окклюдоры нанесен гипоаллергенный термопластичный клей, а при их изготовлении не используются ни латекс, ни консервирующие

вещества, то ими без проблем могут ежедневно пользоваться также и лица с чувствительной кожей.

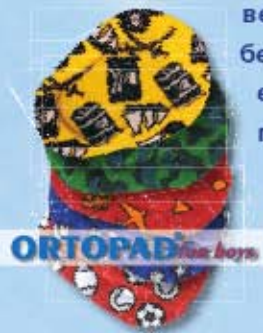

Лечение при помощи окклюдоров

В беседе с Вашим ребенком используйте положительные слова об очках и окклюдорах (наклейках), ежедневно хвалите ребенка за его выдержку, и объясните всем важнейшим людям, с которыми общается Ваш ребенок, почему возникла необходимость лечения при помощи окклюдоров.

Расположите светозащитную вставку окклюдора над центром глаза. Затем начинайте приклеивать окклюдор, хорошо придавливая его Вашей ладонью к чистой, сухой и обезжиренной коже так, чтобы не осталось зазоров, через которые можно было бы что-то увидеть. При этом более узкий край должен быть направлен к носу.

Если лучшая подруга и лучший друг Вашего ребенка считают ношение окклюдора «классным», то можно считать, что лед тронулся.

Имеет смысл проинформировать важнейших лиц, с которыми общается Ваш ребенок, о рекомендациях по ношению окклюдора, сделанных Вашим ортопедом и Вашим врачом-окулистом.



ORTOPAD® и ORTOPAD® skin

В каждой из этих упаковок имеются цветные картинки для наклеивания на окклюдор



ORTOPAD®

состоит из прилегающего и пропускающего воздух волокнистого слоя со специальной вставкой, защищающей глаз от проникновения света, а также слоя хорошо переносимого термопластичного клея.

Общая информация:

В каждой упаковке ORTOPAD® simpaty New, ORTOPAD® for boys / for girls und ORTOPAD® COTTON содержится:

- 5 различных мотивов,
- отдельно упакованные окклюдоры,
- инструкция по применению в каждой упаковке.

размеры: Junior
Medium
Regular

ок. 67 x 50 мм (до 2-го года жизни)
ок. 76 x 54 мм (от 2 до 4 лет)
ок. 85 x 59 мм (с 4 года жизни)

Мотивирующие постеры

Для того чтобы Вам и Вашему ребенку облегчить процесс лечения окклюдором, Вы можете заказать у нас мотивирующий плакат. После использования окклюдоров ORTOPAD® их наклеивают на разметку на плакате так, что со временем возникнет цветное трехмерное изображение (тюлень, принцесса, волшебник, рыба). Таким образом, ношение окклюдора будет ассоциироваться у Вашего ребенка с созданием картинки.

