

Çocuklar için tamamen plastikten yapılmış
yeni nesil gözlük çerçeveleri


TRU  **FRAME**

YENİLİK VE SAĞLAMLIK!



Yeni TRUFRAME®, küçük çocuklar,
hareketli çocuklar ve sportif faaliyetler için
geliştirilmiştir.

Tamamen plastikten yapılmış olan
çerçeveler yaralanma riskini olağan gözlük
çerçevelerine kıyasla önemli ölçüde
azaltmaktadır. Bu yeni nesil gözlüklerin
temel özelliklerini kolay kullanım, sağlamlık
ve hafiflik oluşturmaktadır.

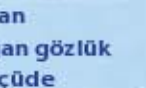

Bir bakışta bütün avantajları:

- rengarenk ve çocuk işidir
- yaralanma riski daha azdır
- elastiki bandı iyi yerleşmesini sağlar
- spor gözlüğü veya yedek gözlük olarak kullanılabilir
- engelli kişilerde de kullanıma uygundur
- metal ve nikel içermez
- optikçi tarafından sık sık ayar yapılmasına artık gerek yoktur
- uygun fiyatlıdır
- Made in Germany, yani Alman ürünüdür

Çocuklara uygun gözlük çerçeveleri zengin renk ve biçim çeşitleriyle piyasaya sunulmuş olup çocuklar tarafından genellikle olumlu değerlendirilmektedir. Bu nedenle lütfen çocuğunuzun gözlük seçimine katılmasına olanak veriniz.

Anne babalar ve öğretmenler genellikle spor yaparken gözlük taktırmaya çekinirler. Halbuki çoğu kez çocuğun net ve üç boyutlu görmesi ancak bu şekilde mümkün olabilmektedir. Gözlük veya kapama bandı kullanılması kişisel duruma bakılarak tavsiye edilir. Eğer bu konuda tereddütlü iseniz ortoptistinize veya göz doktorunuza danışmaktan çekinmeyiniz.

Bu bilgilerle size yardımcı olduğumuzu umar size ve çocuğunuza şaşılık ve ambliopi tedavisinde başarılar dileriz.

Daha başka sorularınız için her zaman memnuniyetle hizmetinizdeyiz.

TRUSETAL VERBANDSTOFFWERK GMBH

ekibiniz

Industriestr. 12
D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Telefon: +49 (0)5207 991688-0
Telefaks: +49 (0)5207 991688-28

E-posta: info@tshs.eu
Internet: www.tshs.eu • www.ortopad-service.eu

*Bu yıl da yine Ortopad®
bağışları ve maddi yardımlar aracılığıyla Afrika
ve Doğu Avrupadaki çeşitli projeleri desteklemekten
dolayı mutluluk duyuyoruz.*

TRUSETAL VERBANDSTOFFWERK GMBH

Trusetal
Anne ve babalar için bilgiler

ORTOPAD mix

çok iyi tolere edilir 100 adet göz kapama bandı



25 harika desenden seçenek imkanı!

- Delikli flaster
- anatomik şekil
- hipoallerjen yapıştırıcı
- ışık geçirmez
- cilt dostu
- hava geçirir



LATEKS İÇERMEZ!

Ortoptik tedavi için renkli göz kapama bantları

Sevgili Anne ve Babalar,

şaşılık ve/veya fonksiyonel görme bozukluğu nedeniyle çocuğunuza kapama tedavisi önerilmiş bulunuyor. Muhtemelen bundan dolayı önce endişelendiniz. Muayene sırasında bir yığın yeni bilgiyle karşılaştınız ve bunları sakın kafayla gözden geçirmek ihtiyacı duyuyorsunuz. Biz de sizin için aşağıda göz kapama bantları ve gözlük çerçeveleriyle ilgili bazı bilgileri bir araya getirmiş bulunuyoruz:




Kapama tedavisi çoğu kez gözlük takılarak yapılmaktadır. Çocuğunuzu cesaretlendiriniz. Ona, gözlüğü ve kapama bandını kararlı bir şekilde kullanmakla görme yeteneğini arttıracığını ve hatta büyük olasılıkla normalleştireceğini söyleyiniz.



Tüm ORTOPAD® göz kapama bantları çocukların görüşü alınarak geliştirilmiş olup üç ayrı büyüklükte (ORTOPAD® Junior, Medium ve Regular) ve çeşitli desenlerde (ORTOPAD® simpaty NEW, ORTOPAD® for girls [kız çocuklar için], ORTOPAD® for boys [erkek çocuklar için], ORTOPAD® COTTON) ve beyaz ile cilt renklerinde piyasaya sunulmuştur.

Bu kapama bantlarının tümü, üretimlerinde düşük alerjenik özellikli Hot-Melt yapıştırıcıları kullanılmış olması ve

lateks ve koruyucu madde içermemeleri dolayısıyla hassas ciltlerde de günlük uygulamalarda sorunsuzca kullanılabilirler.

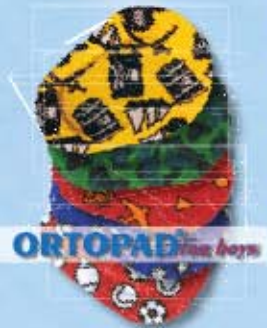

Göz kapama bandı tedavisi

Çocuğunuzla konuşurken gözlük ve bantla ilgili olarak olumlu kelimeler kullanınız, onu, gösterdiği katlanma gücü dolayısıyla her gün övünüz ve temasta bulunduğunuz önemli kişileri kapama bandı tedavisinin gerekliliği konusunda bilgilendiriniz.

Kapama bandını ışıktan koruyucu gömme parçası gözün merkezine gelecek şekilde yerleştiriniz. Ardından bandı elinizin iç yüzüyle bastırarak çocuğun dışarıyı görmesine olanak verecek açıklık bırakmadan temiz, kuru ve yağsız cildin üzerine yapıştırınız. Bandın dar tarafı burun yönüne bakmalıdır.

Eğer çocuğunuzun en iyi arkadaşı bant kullanmayı "harika" olarak nitelendirirse o zaman artık mesele hallolmuş demektir

Çocuğunuzun çevresinde ilişkide bulunduğunuz önemli kişileri ortoptistinizin ve göz doktorunuzun kapama bandı takmayı önerdiğinden haberdar etmeniz önemlidir.



ORTOPAD® ve ORTOPAD® sklin

Her ambalajda göz kapama bantlarının üzerine yapıştırmak için resimler bulunmaktadır.



ORTOPAD®

ışık koruyucu özel gömme parça ve çok iyi tolere edilen bir Hot-Melt yapıştırıcı içeren, yumuşak ve hava geçirimli bir matriksten oluşur.

Genel bilgiler:


Her ORTOPAD® simpaty New, ORTOPAD® for boys / for girls ve ORTOPAD® COTTON ambalajında

- 5 adet farklı motif,
- tek tek ambalajlanmış göz kapama bantları ve
- ambalaj başına bir kullanma talimatı bulunmaktadır

Boyutlar: Junior yaklaşık 67x50 mm (2 yaşına kadar)
Medium yaklaşık 76x54 mm (2 ile 4 yaş arası)
Regular yaklaşık 85x59 mm (4 yaşından itibaren)

Motivasyon afişleri

Bant tedavisini kendiniz ve çocuğunuz açısından kolaylaştırmak için bizden motivasyon afişi isteyebilirsiniz. Bu afişlere ORTOPAD® 'ler kullandıktan sonra yapıştırmakla zamanla renkli, üç boyutlu resimler (fok balığı, prenses, sihirbaz, balık) oluşturulmaktadır.

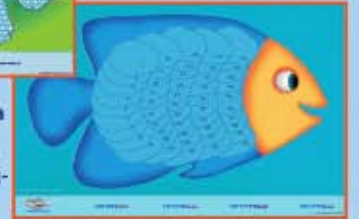

Böylece çocuğunuz kapama bandı kullanımı ile resim ilerlemesi arasında bir bağlantı kurabilir.